

## SUKANVETOLAITE

Sukanvetolaite on pukeutumisen apuväline, jota käytetään sukkiin pukemiseen.

- Suojelee ja helpottaa käyttäjän lihaksia ja niveliä kuormitukselta.
- Helpottaa arjesta selviytymistä ja vähentää avuntarvetta.
- Hyödyllinen, kun lantion liike tai kumartuminen rajoittunut (esim. lonkkaleikkauksen jälkeen) tai kun on polvi- tai selkävaivoja. (Kipuja tai liikerajoituksia)
- Tuo mukanaan turvallisuutta toimintaan.

Sukan vetolaiteita on olemassa lyhyitä ja pitkiä malleja, sekä tukisukanvetolaite.



## Pesuhjeet

### Perusmallinen sukanvetolaite

1. Pese sukanvetolaite pesuaineliukseen kostutetulla siivouspyyhkeellä. Käytä puhdistuksessa ainoastaan neutraalia pesuliuosta.
2. Huuhto pinta puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä.
3. Kuivaa sukanvetolaite huolellisesti.

### Tukisukan sukanvetolaite

1. Pese tukisukanvetolaite 40 asteessa käsipesulla. Käytä neutraalia pyykinpesuaineliuosta.
  2. Venytä sukanvetolaite kosteana oikeaan mittaansa.
  3. Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä.
  4. Kuivaa sukanvetolaite ilmastavassa paikassa.
- Tukisukanvetolaite voidaan myös desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanolilla).

## Käyttöohjeet



1. Taita sukanvetolaite kouruksi, jonka jälkeen, pujota sukka laitteen päälle.

- Varmista, että vedät sukan kärjen aivan laitteen päähän asti.
- Sukan kantapää tulee laitteen alapuolelle.
- Vedä sukka riittävän pitkälle, jolloin se pysyy paremmin paikoillaan.



2. Laita sukanvetolaite lattialle jalan viereen ja pidä kiinni laitteen naruista.



3. Pujota jalka sukanvetolaitteen muodostaman kourun sisälle.



4. Vedä laitteen naruista, jolloin sukanvetolaite liukuu jalkaa myöten jättäen sukan jalkaan.